

Вспомогательное изделие, предназначенное для смягчения осевых ударных и стригущих воздействий, возникающих в результате вертикальных и вращательных движений в процессе ходьбы. Идеально подходит для занятий спортом и таких видов активного отдыха, как гольф, теннис и пеший туризм

Торсионный телескопический пилон ТТPro

Спецификация

Максимальный вес пользователя/уровень вертикального осевого ударного воздействия:	100 кг/1-4 125 кг/1-3
Вес изделия:	от 317 г
Сборочные размеры: адаптером	135-260 мм (с под пирамидку) 145 мм (с зажимом под трубку голени)
Диаметр голенной системы:	30 мм



Проксимальный адаптер под пирамидку



Дистальный зажим под трубку голени

Пример заказа


Проксимальный адаптер под пирамидку			
Шифр изделия	Тип пилона	Торсионный стержень	Набор пружин
ТТPRO	PYR	3	В

Выбрано: ТТPRO-PYR3В

Дистальный зажим под трубку голени			
Шифр изделия	Тип пилона	Торсионный стержень	Набор пружин
ТТPRO	30	3	В

Выбрано: ТТPRO-30-3В

Сборочные размеры

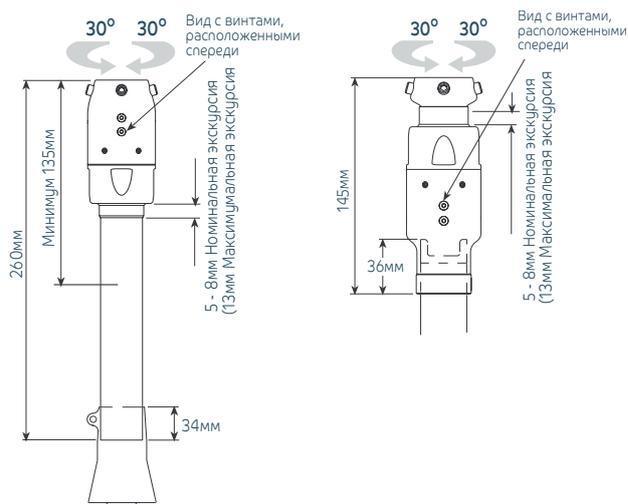

Пилон ТТPro

Цветовая метка торсионной пружины

- P ▲ - фиолетовая (низкая жесткость, 8кг/мм)
- W △ - белая (умеренная жесткость, 11кг/мм)
- B ▲ - черная (умеренная жесткость, 14кг/мм)

Уровень вертикального осевого ударного воздействия

Низкий
Умеренный
Высокий

Вес пользователя


44-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-125 кг
100-115 116-130 131-150 151-170 171-195 196-220 221-255 256-275 фунтов

1P	2P	2P	2W	2W	3B	3B	3B
2P	2W	3W	3W	3B	3B	3B	3B
3W	3W	3B	3B	3B	3B	-	-

Набор торсионных стержней и пружин

41
32

Сборочная схема пилона ТТPro

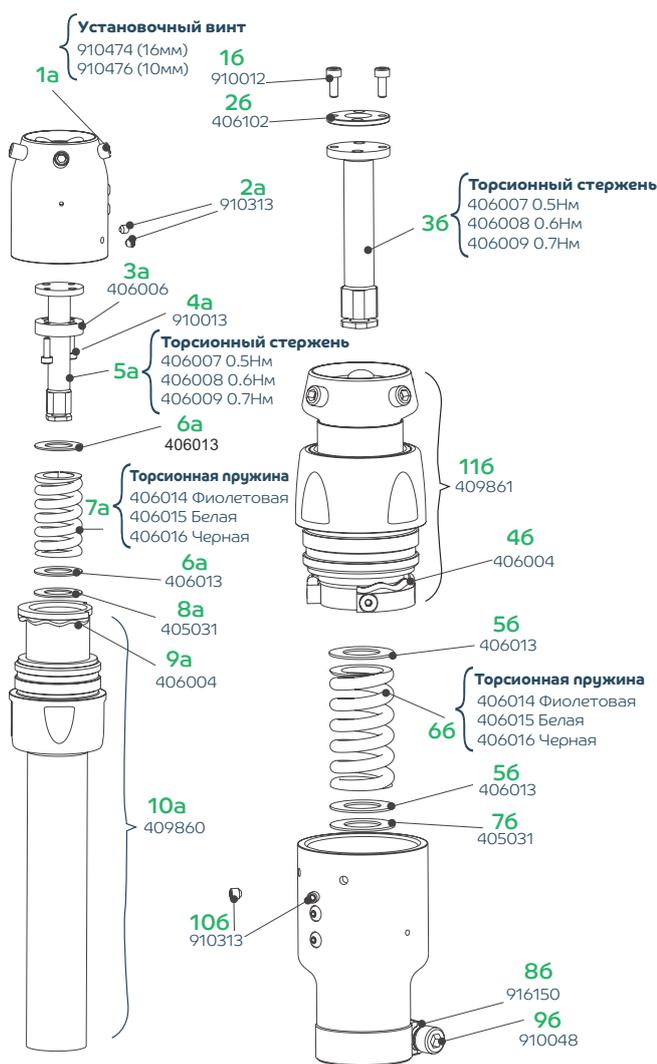

Цветовая метка торсионной пружины

- Р ▲ - фиолетовая цветовая метка (низкая жесткость, 8кг/мм)
 W△ - белая цветовая метка (умеренная жесткость, 11кг/мм)
 B▲ - черная цветовая метка (умеренная жесткость, 14кг/мм)

Пилон ТТ-PRO с адаптером под пирамидку

Поз.	Шифр	Наименование	Кол-во
1a	910474	Установочный винт с шестигранном шлицем, 16мм	4 шт.
	910478	Установочный винт с шестигранном шлицем, 10мм	4 шт.
2a	910313	Установочный винт	2 шт.
3a	406006	Пластина круглая	1 шт.
4a	910013	Винт крепежный	2 шт.
5a	406007	Стержень торсионный, категория жесткости 1 (0.5 Нм/град.)	1 шт.
	406008	Стержень торсионный, категория жесткости 2 (0.6 Нм/град.)	
	406009	Стержень торсионный, категория жесткости 3 (0.7 Нм/град.)	
6a	406013	Шайба крепежа пружины	2 шт.
7a	406014	Пружина торсионная	1 шт.
	406015	Пружина торсионная, фиолетовая (8 кг/мм)	
	406016	Пружина торсионная, белая (11 кг/мм)	
	406016	Пружина торсионная, черная (14 кг/мм)	
8a	405031	Кольцо	1 шт.
9a	406004	Кольцо специальное	1 шт.
10a	409860	Сборка голени (опора)	1 шт.

Пилон ТТ-PRO с зажимом под трубку голени 30 мм

Поз.	Шифр	Наименование	Кол-во
16	910012	Болт крепежный	2 шт.
26	406102	Пластина	1 шт.
3a	406007	Стержень торсионный, категория жесткости 1 (0.5 Нм/град.)	1 шт.
	406008	Стержень торсионный, категория жесткости 2 (0.6 Нм/град.)	
	406009	Стержень торсионный, категория жесткости 3 (0.7 Нм/град.)	
46	406004	Кольцо специальное	1 шт.
56	406013	Шайба крепежа пружины	2 шт.
66	406014	Пружина торсионная	1 шт.
	406015	Пружина торсионная, фиолетовая (8 кг/мм)	
	406016	Пружина торсионная, белая (11 кг/мм)	
	406016	Пружина торсионная, черная (14 кг/мм)	
76	405031	Кольцо	1 шт.
86	916150	Гроверная шайба	1 шт.
96	910048	Стяжной винт	1 шт.
106	910313	Установочный винт	2 шт.
116	409861	Сборка корпуса с адаптером под пирамидку	1 шт.

Инструкция для протезиста:

пилон ТТ-PRO с проксимальным адаптером под пирамидку	938248
пилон ТТ-PRO с дистальным зажимом под трубку голени	938257