

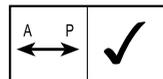
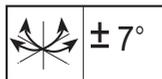


239017

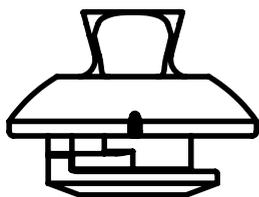

239089

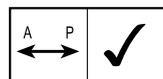

Комплект проксимального адаптера-пирамидки

Инструкция для протезиста

239017 - ротационно-сдвиговой адаптер-пирамидка

239089 - сдвиговой адаптер-пирамидка (без ротации)




Blatchford


239017 - ротационно-сдвиговой адаптер-пирамидка

239089 - сдвиговой адаптер-пирамидка (без ротации)

RU

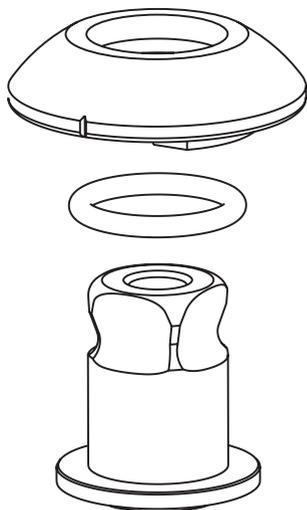

239017

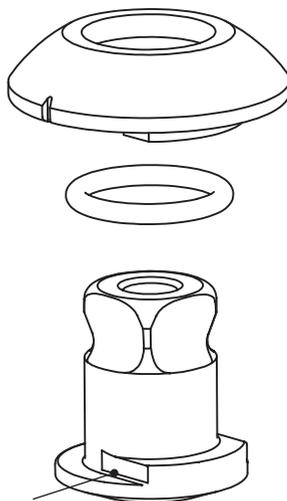


Выступ для предотвращения ротации

239089




Сборочные размеры:

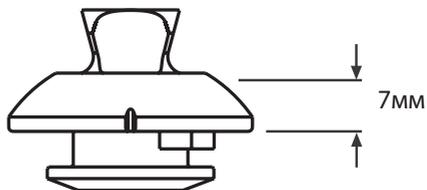


Для изделий с динамической опорой голени


239017

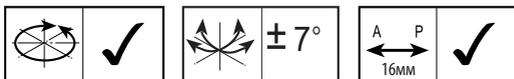

239089

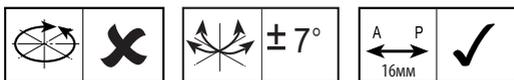


938306

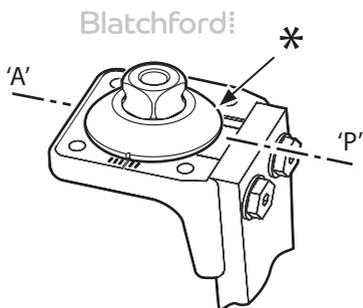


Для коленного модуля Mercury

239017


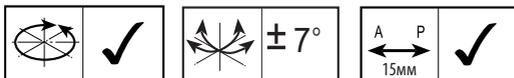


239089

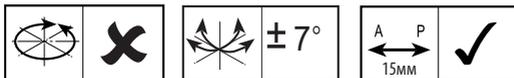


938251

Резьбовой фиксатор
Loctite 222

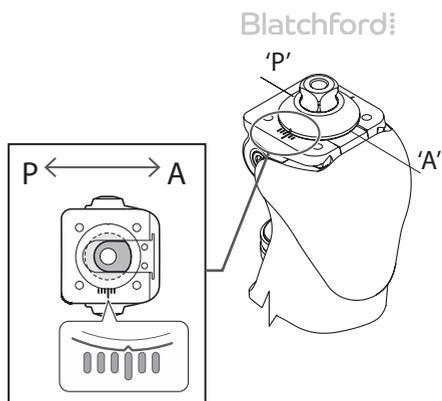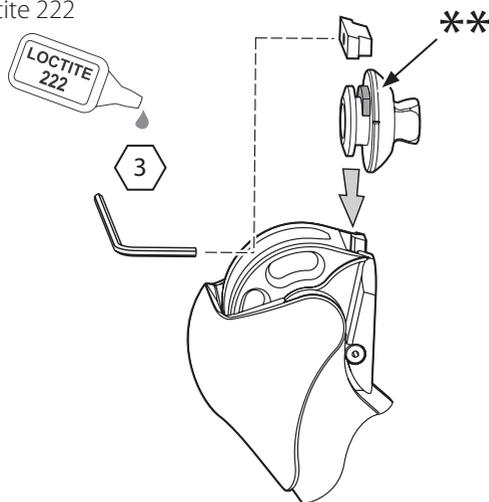



Для шасси коленного модуля ESK+ с креплением под 4 болта

239017

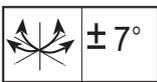


938205

239089

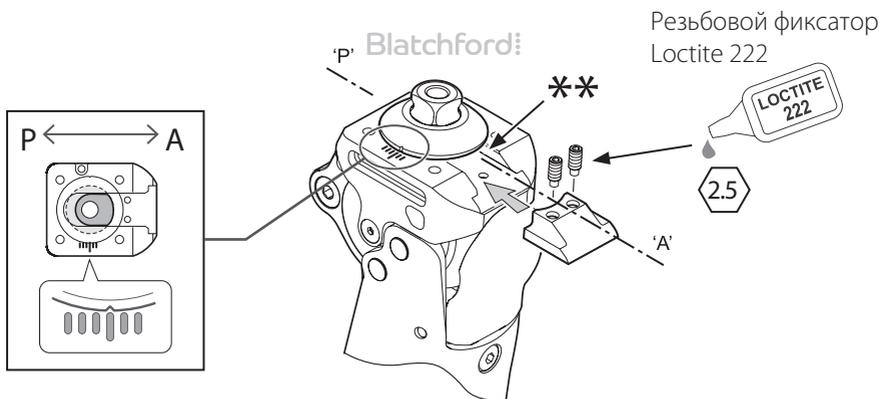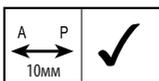

Для системы конечности Linx и коленного модуля Orion3

239017

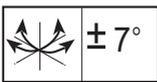

Linx

938353


239089



Orion3



938374

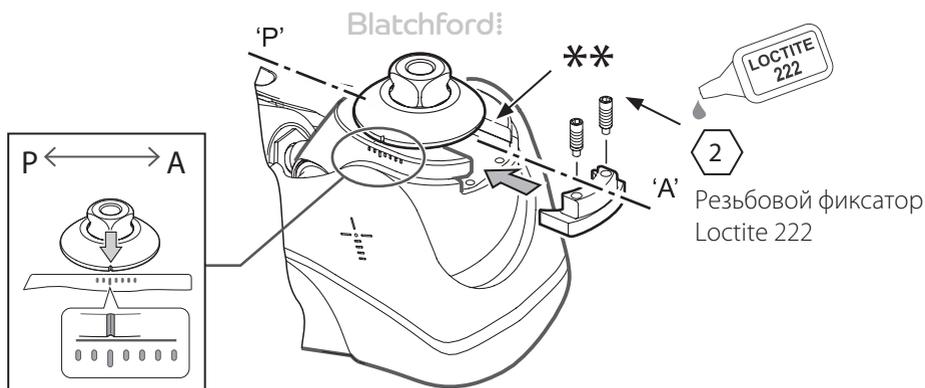



Для коленного модуля KX06V2

239017



938409

239089

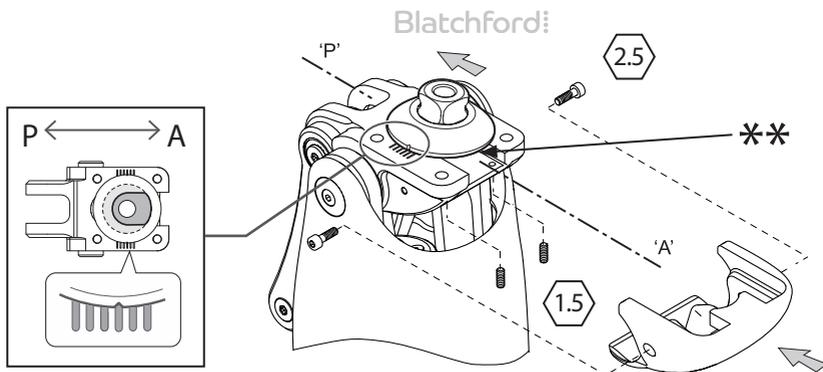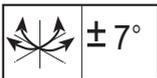

*

Выступ для предотвращения ротации находится сзади.

**

Выступ для предотвращения ротации находится спереди.

A-P

Плоскость Вперед - Назад

Зарегистрированный адрес производителя:

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Blatchford является зарегистрированным товарным знаком Blatchford Products Ltd.

blatchford.co.uk/дистрибьюторы

UK

Blatchford Products Limited
Unit D Antura
Kingsland Business Park
Basingstoke
RG24 8PZ
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 1256 316600
Fax: +44 (0) 1256 316710
Email: sales@blatchford.co.uk
www.blatchford.co.uk

North America

Endolite North America
1031 Byers Road
Miamisburg
Ohio 45342
USA
Tel: 800.548.3534
Fax: 800.929.3636
Email: info@endolite.com
www.endolite.com

Germany

Endolite Deutschland GmbH,
Fritz-Hornschuch-Str. 9 (3.OG)
D-95326 Kulmbach
Tel: +49 (0) 9221/87808-0
Fax: +49 (0) 9221/87808-60
Email: info@endolite.de
www.endolite.de

France

Endolite France
Parc d'Activités de l'Aéroport
125 Impasse
Jean-Baptiste Say
34470 PEROLS
FRANCE
Tel: +33 (0) 467 820 820
Fax: +33 (0) 467 073 630
Email: contact@endolite.fr
www.endolite.fr

India

Endolite India Ltd
A4 Naraina Industrial Area
Phase - 1
New Delhi
INDIA - 110028
Tel: +91 (011) 45689955
Fax: +91 (011) 25891543
Email: endolite@vsnl.com
www.endoliteindia.com

Norway

Ortopro AS
Hardangervegen 72
seksjon 17
5224 Nesttun
NORWAY
Tel: +47 (0) 55918860
Email: post@ortopro.no
www.ortopro.no