



# Mini Blade<sup>XT</sup>

Руководство пользователя

MBXTAB1SM-MBXTAP3SM

**Blatchford:**

Стопа Mini Blade XT предназначена для ходьбы и имеет конструкцию специально разработанную для занятий общими видами спорта и бегом.

### Ступени и лестницы

Из-за глубокого С-образного бокового профиля стопы Mini BladeXT следует соблюдать особую осторожность при спуске по лестнице и ступенькам из-за потенциальной опасности оступиться, сделав слишком большой шаг.



Помните о потенциальной возможности защемления пальцев!



## Ключевые положения и меры предосторожности при эксплуатации изделия

Пользователь всегда должен помнить о риске подскользнуться при нахождении на влажных/скользких поверхностях.

Чрезмерный износ спортивной подошвы может привести к потере ее крепления на стопе.

Чрезмерный износ или повреждение пружинных элементов могут привести к повреждению изделия. Протез не должен использоваться, если спортивная подошва сильно изношена, порвана или свободно болтается на стопе.

**Перед началом эксплуатации стопы Mini BladeXT пользователь обязан внимательно осмотреть ее, и в особенности пружины пятки и мыска, на предмет возможных повреждений.**

Пользователь обязан незамедлительно сообщить своему протезисту/врачу о любых произошедших с протезом изменениях.

Изменения могут включать в себя следующее:

- Снижение возврата энергии;
- Посторонние шумы;
- Ощутимое смягчение мыска стопы и/или пятки.

Пользователь также обязан незамедлительно сообщить своему протезисту/лечащему врачу о любых изменениях в массе тела и/или уровне двигательной активности.

Сборку и ремонт стопы Mini BladeXT имеют право производить только сертифицированные специалисты,

прошедшие обучение в учебных центрах Blatchford.

Изделие является водостойким, максимальная глубина погружения 1 метр.

Избегайте контакта с абразивной окружающей средой, как например, песок и пыль, для предотвращения разрушения и повреждения частей стопы рекомендуется после воздействия абразивной среды тщательно промыть изделие под струей проточной пресной воды.

При попадании изделия в морскую или хлорированную воду также рекомендуется промыть его под струей проточной пресной воды.

Изделие может использоваться только в температурном диапазоне от  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  (от  $5^{\circ}\text{F}$  до  $122^{\circ}\text{F}$ ).

### Очистка:

Для очистки внешней поверхности используйте влажную не ворсистую ткань и детское мыло. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** агрессивные моющие средства. Перед использованием необходима тщательная просушка изделия.

### Зарегистрированный адрес производителя

Blatchford Products Limited, Lister Road,  
Basingstoke RG22 4AH, UK.

**Пожалуйста, сохраняйте данную  
инструкцию.**

BladeXT и Blatchford являются товарными марками компании Blatchford Products Limited.



[blatchford.co.uk/дистрибьюторы](http://blatchford.co.uk/дистрибьюторы)

## **UK**

Blatchford Products Ltd.  
Unit D Antura  
Kingsland Business Park  
Basingstoke  
RG24 8PZ  
UNITED KINGDOM  
Tel: +44 (0) 1256 316600  
Fax: +44 (0) 1256 316710  
Email: [customer.service@blatchford.co.uk](mailto:customer.service@blatchford.co.uk)  
[blatchford.co.uk](http://blatchford.co.uk)  
[www.blatchford.co.uk](http://www.blatchford.co.uk)

## **US & Canada**

Blatchford Inc.  
1031 Byers Road  
Miamisburg  
Ohio 45342  
USA  
Tel: +1 (0) 800 548 3534  
Fax: +1 (0) 800 929 3636  
Email: [info@blatchfordus.com](mailto:info@blatchfordus.com)  
[www.blatchfordus.com](http://www.blatchfordus.com)

## **Germany**

Blatchford Europe GmbH,  
Fritz-Hornschuch-Str. 9 (3.OG)  
D-95326 Kulmbach  
GERMANY  
Tel: +49 (0) 9221/87808-0  
Fax: +49 (0) 9221/87808-60  
Email: [info@blatchford.de](mailto:info@blatchford.de)  
[www.blatchford.de](http://www.blatchford.de)

## **France**

Blatchford SAS  
Parc d'Activités de l'Aéroport  
125 Impasse  
Jean-Baptiste Say  
34470 PEROLS  
FRANCE  
Tel: +33 (0) 467 820 820  
Fax: +33 (0) 467 073 630  
Email: [contact@blatchford.fr](mailto:contact@blatchford.fr)  
[www.blatchford.fr](http://www.blatchford.fr)

## **India**

Endolite India Ltd  
A4 Naraina Industrial Area  
Phase - 1  
New Delhi  
INDIA – 110028  
Tel: +91 (011) 45689955  
Fax: +91 (011) 25891543  
Email: [endolite@vsnl.com](mailto:endolite@vsnl.com)  
[www.endoliteindia.com](http://www.endoliteindia.com)

## **Norway**

Ortopro AS  
Hardangervegen 72  
Seksjon 17  
5224 Nesttun  
NORWAY  
Tel: +47 (0) 55 91 88 60  
Email: [post@ortopro.no](mailto:post@ortopro.no)  
[www.ortopro.no](http://www.ortopro.no)