

# Silcare Breathe

## смягчающий дышащий перфорированный чехол

Руководство для пользователя

SBTTCP22L - SBTTCP40L

**Blatchford:**

# Смягчающий дышащий перфорированный чехол Silcare Breathe SBTTCP22L - SBTTCP40L

RU

Пожалуйста сохраните данную инструкцию.

«Дышащий» перфорированный силиконовый чехол Silcare Breathe от Blatchford предоставляет смягчение гильзового интерфейса (культия/протезная гильза) и позволяет поту выходить наружу через перфорированные отверстия и удерживать сухой кожу культи. Чехол изготавливается из биосовместимых материалов.

Чехол предназначен для пользователей, имеющих двигательную активность или потенциал для достижения уровня двигательной активности 3 - 4 (от умеренного до высокого).

Для получения оптимального комфорта при носке чехла пользователь должен уметь правильно пользоваться чехлом, а также правильно снимать и надевать его. Особое внимание следует обратить на раздел посвященный уходу и очистке изделия.

Пользователь обязан немедленно оповестить протезиста при существенном изменении его состояния (изменение веса, уровня двигательной активности, условий эксплуатации протеза).

**Пользователи с чувствительной кожей, с диабетическими заболеваниями и пользователи с сосудистыми заболеваниями должны быть особенно внимательными, и по возможности применять специальную протезную мазь на проблемные участки кожи культи. Для этого рекомендуется обычная визуальная проверка, при необходимости пользователь должен проконсультироваться с протезистом/лечащим врачом.**


**Избегайте загрязнение чехла материалами наподобие стекловолкна, это может вызвать раздражение кожи и повреждение чехла.**

## Снятие и надевание чехла

**При снятии/надевании протезного чехла следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить чехол ногтями или острыми украшениями.**

**Не натягивайте и не растягивайте чехол.**

1. **Выверните** (аккуратно скатайте) чехол наизнанку.
2. Убедитесь в том, что чехол расположен правильно и соответствует верхнему профилю.
3. Осторожно **накатайте** чехол на культю, постарайтесь избежать образования воздушных карманов.

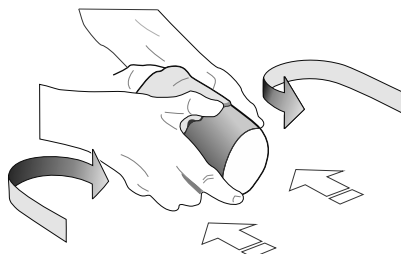

**Внимание:** При использовании протезного чулка при надевании чехла могут возникать статические разряды.

**Тканное покрытие чехла может немного собираться вокруг перфорационных отверстий. Это не влияет на функциональность или эффективность работы чехла.**

# Уход за изделием и очистка

Ежедневно аккуратно промывайте внутреннюю часть чехла, во избежание появления патологических бактерий. Используйте детское неароматизированное мыло (с нейтральным pH).

Возможна ручная стирка или бережная машинная стирка в холодной воде.

Перфорированный чехол может быть осторожно заполнен теплой водой, придерживая и закрывая его за проксимальный (открытый) конец осторожно надавливайте для прочистки перфорационных отверстий.

После стирки тщательно промойте чехол для удаления остатков моющего средства и тщательно высушите перед началом носки.

Будьте аккуратны при сушке и хранении чехла. Промокните чехол неворсистой салфеткой или просто оставьте сохнуть. При сушке не выворачивайте чехол наизнанку, поскольку это может растянуть чехол или нарушить его форму.

При хранении чехла, если он вывернут наизнанку, избегайте попадания различной пыли, поскольку это может вызвать раздражение кожи.

## Уход за кожей культы:

При использовании чехла рекомендуется ежедневный уход за культей, при котором культя моется при помощи детского неароматизированного мыла (с нейтральным pH). Прежде чем высушить кожу, тщательно смойте с нее остатки моющего средства. Используйте лосьон для сухой кожи. Удостоверьтесь, что любые повреждения кожи тщательно обработаны, при необходимости перевяжите ранки.

Не используйте отжим и сушку в стиральной машине.

Не используйте спреи на основе спиртов, бытовых очистителей или абразивные моющие средства, поскольку они могут серьезно повредить чехол и вызвать раздражение кожи.

Примечание:

Применение антиперспирантов может повлиять (обесцветить) на окраску материала гильзы.



## Предупреждения:



Внимание: Во избежание опасности асфиксии (удушения), обязательно держите чехол в недоступном для детей и животных месте.



Избегайте влияния на чехол прямых солнечных лучей и источников тепла.



При повреждении чехла немедленно прекратите его использование.



Прекратите использовать чехол в случае, если отверстия перфорации начали увеличиваться, поскольку это может защемлять кожу культы и вызвать раздражение.



При наличии других заболеваний согласуйте с лечащим врачом применение чехла и рекомендации по уходу за кожей культы.



О любом ухудшении состояния культы пользователь обязан незамедлительно сообщить своему протезисту/лечащему врачу.

## Зарегистрированный адрес производителя:

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AN, UK.

Silcare Breathe и Blatchford являются зарегистрированными торговыми марками компании Blatchford Products Limited.

blatchford.co.uk/дистрибьюторы

### **UK**

Blatchford Products Ltd.  
Unit D Antura  
Kingsland Business Park  
Basingstoke  
RG24 8PZ  
UNITED KINGDOM  
Tel: +44 (0) 1256 316600  
Fax: +44 (0) 1256 316710  
Email: customer.service@  
blatchford.co.uk  
www.blatchford.co.uk

### **US & Canada**

Blatchford Inc.  
1031 Byers Road  
Miamisburg  
Ohio 45342  
USA  
Tel: +1 (0) 800 548 3534  
Fax: +1 (0) 800 929 3636  
Email: info@blatchfordus.com  
www.blatchfordus.com

### **Germany**

Blatchford Europe GmbH,  
Fritz-Hornschuch-Str. 9 (3.OG)  
D-95326 Kulmbach  
GERMANY  
Tel: +49 (0) 9221/87808-0  
Fax: +49 (0) 9221/87808-60  
Email: info@blatchford.de  
www.blatchford.de

### **France**

Blatchford SAS  
Parc d'Activités de l'Aéroport  
125 Impasse  
Jean-Baptiste Say  
34470 PEROLS  
FRANCE  
Tel: +33 (0) 467 820 820  
Fax: +33 (0) 467 073 630  
Email: contact@blatchford.fr  
www.blatchford.fr

### **India**

Endolite India Ltd  
A4 Naraina Industrial Area  
Phase - 1  
New Delhi  
INDIA – 110028  
Tel: +91 (011) 45689955  
Fax: +91 (011) 25891543  
Email: endolite@vsnl.com  
www.endoliteindia.com

### **Norway**

Ortopro AS  
Hardangervegen 72  
Seksjon 17  
5224 Nesttun  
NORWAY  
Tel: +47 (0) 55 91 88 60  
Email: post@ortopro.no  
www.ortopro.no

© Blatchford Products Limited 2019. Все права защищены.

Патенты:

Евросоюз: 2254526, 2653138

США: 8308815, 8668744

Применение патента: Великобритания: 1616241.4



938368/3-0719