

Руководство по коррекции размеров протезных дышащих перфорированных чехлов Silcare Liner

Пациент (Ф.И.О.): _____

Номер краты: _____

ЛЕВ.
на левую голень

ПРАВ.
на правую голень


Рекомендации по уменьшению объема:

- 3-5% уменьшение проксимальной части зависит от состояния мягких тканей культы и костистой анатомии;
- 0-1% дистальное уменьшение также зависит от перечисленных выше факторов;
- Убедитесь в том, что Ваши измерения произведены правильно и точно, поскольку от этого зависит эффективный контакт гильзового интерфейса с культей.

Уменьшение объема должно преимущественно выполняться для задней области мягких тканей. Незначительные уменьшения допускается производить и в пара-голенной области, с целью подчеркнуть костистую анатомию.

Размеры чехла:

22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40

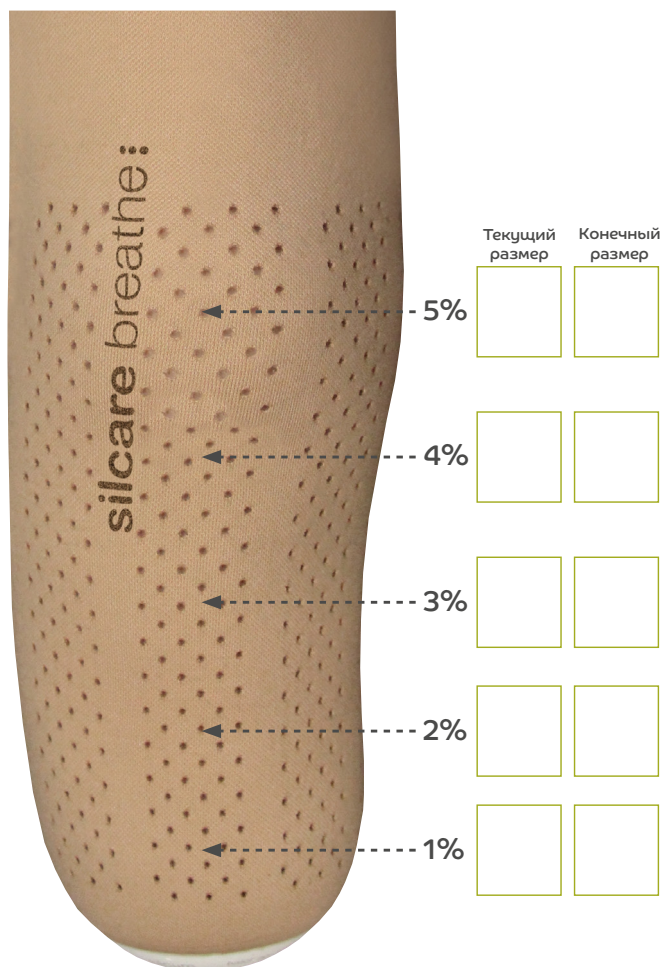

Размер (см)	5% Уменьшение	4% Уменьшение	3% Уменьшение	2% Уменьшение	1% Уменьшение
55	52.25	52.8	53.35	53.9	54.45
54	51.3	51.84	52.38	52.92	53.46
53	50.35	50.88	51.41	51.94	52.47
52	49.4	49.92	50.44	50.96	51.48
51	48.45	48.96	49.47	49.98	50.49
50	47.5	48	48.5	49	49.5
49	46.55	47.04	47.53	48.02	48.51
48	45.6	46.08	46.56	47.04	47.52
47	44.65	45.12	45.59	46.06	46.53
46	43.7	44.16	44.62	45.08	45.54
45	42.75	43.2	43.65	44.1	44.55
44	41.8	42.24	42.68	43.12	43.56
43	40.85	41.28	41.71	42.14	42.57
42	39.9	40.32	40.74	41.16	41.58
41	38.95	39.36	39.77	40.18	40.59
40	38	38.4	38.8	39.2	39.6
39	37.05	37.44	37.83	38.22	38.61
38	36.1	36.48	36.86	37.24	37.62
37	35.15	35.52	35.89	36.26	36.63
36	34.2	34.56	34.92	35.28	35.64
35	33.25	33.6	33.95	34.3	34.65
34	32.3	32.64	32.98	33.32	33.66
33	31.35	31.68	32.01	32.34	32.67
32	30.4	30.72	31.04	31.36	31.68
31	29.45	29.76	30.07	30.38	30.69
30	28.5	28.8	29.1	29.4	29.7
29	27.55	27.84	28.13	28.42	28.71
28	26.6	26.88	27.16	27.44	27.72
27	25.65	25.92	26.19	26.46	26.73
26	24.7	24.96	25.22	25.48	25.74
25	23.75	24	24.25	24.5	24.75
24	22.8	23.04	23.28	23.52	23.76
23	21.85	22.08	22.31	22.54	22.77
22	20.9	21.12	21.34	21.56	21.78

endolite.ru

Blatchford

Клинический сервис - ООО «Эндолайт Центр»
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д. 12
Тел.: +7 (495) 787 5279; Тел./Факс: +7 (495) 787 5280; E-mail: sales@endolite.ru

Поставка комплектующих - ООО «Компания Вита-Орта»
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д. 10
Тел./Факс: +7 (495) 103 4004; E-mail: sales@vitaorta.ru

Chas A Blatchford & Sons Ltd, Unit D, Antura, Kingsland Business Park, Basingstoke, RG24 8PZ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1256 316600, Fax: +44 (0) 1256 316710, E-mail: sales@blatchford.co.uk



IM13